

ARIES Avicenum PHLEBO 140 wzmocnione podkolanówki czarny

Cena od: 46,50 zł



Opis produktu

Podkolanówki profilaktyczne ARIES Avicenum Phlebo 140

wzmocnione ze względu na stopień ucisku zaliczane są do I klasy kompresji. Są to idealne rozwiązanie dla osób z objawami niewydolności żylnych, uczuciami zmęczenia i napięcia w nogach oraz dla osób z problemami z porażkami niewydolności żylnych.

Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wyrobów gwarantuje największy ucisk w okolicy stawu skokowego, szczególnie w kierunku łydki. Usprawnia to naturalne krążenie krwi w celu leczenia i profilaktyki chorób żylnych.

Dzięki regularnemu noszeniu podkolanówek zmniejsza się nasilenie pierwszych objawów choroby.

Zostały wykonane za pomocą technologii okrętego splotu.

SZCZEGÓŁY:

KLASA KOMPRESJI: I (18-21 mmHg)

SKŁAD: 69% PAD Nylon, 31% elastan LYCRA

WERSJA: Czubki zamknięte, wzmocniona pięta i palce

LINIA: Wzmocnione

KOLOR: Czarny

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI: Normal i Long

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kończynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki w punkcie b (patrz tabela rozmiarów poniżej) jest najwyższe i osiąga wartości 18 – 21 mmHg. Swoją skutecznością i bezpieczeństwem zachowuj przez okres 6 miesięcy od pierwszego użycia przestrzegaj zasad ich pielęgnacji i przechowywania.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobciążonej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość we wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie piąty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piąty, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródła ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

WSKAZANIA:

- przewlekła niewydolność żylna
- pierwotne i wtórne żyłaki kończyn dolnych
- powierzchnowe zakrzepowe zapalenie żył
- obrzęk związany z zespołem pozakrzepowym po wyleczeniu zakrzepicy żył głębokich
- obrzęki i żyłaki w ciąży
- stany po zakrzepicy i zakrzepowym zapaleniu kończyn dolnych
- zapobieganie zakrzepicy żył głębokich przy leczeniu chirurgicznym, a następnie także chorobach zakrzepowo-zatorowych
- obrzęki kończyn dolnych (pooperacyjne i pourazowe, limfatyczne, obrzęki przy nadwadze, idiopatyczne obrzęki kończyn dolnych)
- wsparcie kompresyjne po skleroterapii żyłaków kończyn dolnych
- wsparcie kompresyjne po chirurgicznym usunięciu żyłaków (chirurgia klasyczna, ablacja radiowa lub ablacja laserowa żyłaków)

-zakrzepica podczas podróży

PRZECIWWSKAZANIA:

-uciążliwe stany uszkodzenia skóry

-ostre niedokrwienie kończyn

-krytyczne niedokrwienie kończyn

-zdekompensowana niewydolność serca

-bolesny obrzęk śródmiąższowy i bolesny obrzęk błonowy

-nadwrażliwość na użyte materiały

-zaburzenia czucia kończyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

Warianty produktu



Rozmiar S, długość Normal

46,50 zł

Rozmiar S, długość Normal



Rozmiar S, długość Long

46,50 zł

Rozmiar S, długość Long



Rozmiar M, długość Normal

46,50 zł

Rozmiar M, długość Normal



Rozmiar M, długość Long

46,50 zł

Rozmiar M, długość Long



Rozmiar L, długość Normal

46,50 zł

Rozmiar L, długość Normal



Rozmiar L, długość Long

46,50 zł

Rozmiar L, długość Long

Galeria

