

ARIES Avicenum PHLEBO 360 podkolanówki długość normalna, czubki otwarte, czarne



Cena od: 107,90 zł

Opis produktu

Podkolanówki uciskowe ARIES Avicenum PHLEBO 360 z czubkami otwartymi drugiej klasy kompresji wspomagają prawidłowe działanie zastawek żylnych, stabilizują krążenie krwi i są niezastępowanym elementem terapii uciskowej. Podkolanówki z serii 360 produkowane są z delikatnego i przyjemnego mikrowłókna. Zdrowotne podkolanówki Aries Avicenum PHLEBO 360 należą do produktów przeciwzakrzepowych stosowanych w profilaktyce i leczeniu zakrzepic kończyn dolnych. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wyrobów gwarantuje największy ucisk w okolicy stawu skokowego, zmniejszając się w kierunku łydki.

Usprawnia to naturalne krążenie krwi w celu leczenia i profilaktyki chorób żył. W efekcie zostaje ograniczony obrzęk nogi i następuje zmniejszenie widoczności żyłaków. Produkty te są bezpieczne dla zdrowia pod kątem długoterminowej terapii. Model ten posiada otwarty czubek oraz wzmocnioną piętę co znacząco przedłuża trwałość i czas użytkowania wyrobu.

SZCZEGÓŁY:

KLASA KOMPRESJI: II (23-32 mmHg)

SKŁAD: 60% PAD Nylon, 40% elastan LYCRA

WERSJA: Palce otwarte, wzmocniona pięta

KOLOR: Czarny

DŁUGOŚĆ: Normal

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kośćczynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki w punkcie b (patrz tabela rozmiarów poniżej) jest najwyższe i osiąga wartość 23 – 32 mmHg.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kośćczynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kośćczyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość we wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować pięty, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszcza się do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie.

Suszy? w stanie roz?o?onym z daleka od ?róde? ciep?a. Przechowywa? w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

WSKAZANIA:

- przewlek?a niewydolno?? ?ylna
- pierwotne i wtórne ?ylaki ko?czyn dolnych
- powierzchowne zakrzepowe zapalenie ?y?
- obrz?k zwi?zany z zespo?em pozakrzepowym po wyleczeniu zakrzepicy ?y? g??bokich
- obrz?ki i ?ylaki w ci??y
- stany po zakrzepicy i zakrzepowym zapaleniu ko?czyn dolnych
- zapobieganie zakrzepicy ?y? g??bokich przy leczeniu chirurgicznym, a nast?pnie tak?e chorobach zakrzepowo-zatorowych
- obrz?ki ko?czyn dolnych (pooperacyjne i pourazowe, limfatyczne, obrz?ki przy nadwadze, idiopatyczne obrz?ki ko?czyn dolnych)
- wsparcie kompresyjne po skleroterapii ?ylaków ko?czyn dolnych
- wsparcie kompresyjne po chirurgicznym usuni?ciu ?ylaków (chirurgia klasyczna, ablacja radiowa lub ablacja -laserowa ?ylaków)
- zakrzepica podczas podró?y

PRZECIWSKAZANIA:

- uci??liwe s?cz?ce si? uszkodzenia skóry
- ostre niedokrwienie ko?czyn
- krytyczne niedokrwienie ko?czyn
- zdekompensowana niewydolno?? serca
- bolesny obrz?k siniczny i bolesny obrz?k bia?y
- nadwra?liwo?? na u?yte materia?y
- zaburzenia czucia ko?czyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

Zdj?cie na danej aukcji jest nieaktualne, poniewa? producent nie dodaje ju? dodatku srebra do produktu. Nowe opakowanie nie zawiera oznaczenia SANITIZED SILVER.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. U?YWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJ? U?YWANIA LUB ETYKIET?.

Warianty produktu



Rozmiar S

107,90 zł

Rozmiar S



Rozmiar M
Rozmiar M

107,90 zł



Rozmiar L
Rozmiar L

107,90 zł



Rozmiar XL
Rozmiar XL

107,90 zł



Rozmiar XXL
Rozmiar XXL

107,90 zł

Galeria



