

ARIES Avicenum PHLEBO 360 pończochy lamówka czubek zamknięty czarny



Cena od: 129,90 zł

Opis produktu

Pończochy uciskowe ARIES Avicenum PHLEBO 360 z

czubkami zamkniętymi drugiej klasy kompresji wspomagają prawidłowe działanie zastawek żylnych, stabilizują krążenie krwi i są niezastąpionym elementem terapii uciskowej.

Pończochy z serii 360 produkowane są z delikatnego i przyjemnego mikrowłókna. Zdrowotne pończochy Aries Avicenum PHLEBO 360 należą do produktów przeciwżylakowych stosowanych w profilaktyce i leczeniu żylaków kończyn dolnych. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wyrobów gwarantuje największy ucisk w okolicy stawu skokowego, zmniejszający się w kierunku łydki.

Usprawnia to naturalne krążenie krwi w celu leczenia i profilaktyki chorób żył. W efekcie zostaje ograniczony obrzęk nogi i następuje zmniejszenie widoczności żyłaków. Produkty te są bezpieczne dla zdrowia pod kątem długoterminowej terapii. Model ten posiada zamknięty czubek oraz wzmocnioną piętę co znacząco przedłuża trwałość i czas użytkowania wyrobu.

SZCZEGÓŁY:

KLASA KOMPRESJI: II (23-32 mmHg)

SKŁAD: 60% PAD Nylon, 40% elastan LYCRA

WERSJA: Czubki zamknięte, wzmocniona pięta

WYKOŃCZENIE MANKIETU: Lamówka

KOLOR: Czarny

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kończynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki w punkcie b (patrz tabela rozmiarów poniżej) jest najwyższe i osiąga wartość 23 – 32 mmHg.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość we wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięt. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować pięty, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie.

Suszy? w stanie roz?o?onym z daleka od ?róde? ciep?a. Przechowywa? w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

WSKAZANIA:

- przewlek?a niewydolno?? ?ylna
- pierwotne i wtórne ?ylaki ko?czyn dolnych
- powierzchowne zakrzepowe zapalenie ?y?
- obrz?k zwi?zany z zespo?em pozakrzepowym po wyleczeniu zakrzepicy ?y? g??bokich
- obrz?ki i ?ylaki w ci??y
- stany po zakrzepicy i zakrzepowym zapaleniu ko?czyn dolnych
- zapobieganie zakrzepicy ?y? g??bokich przy leczeniu chirurgicznym, a nast?pnie tak?e chorobach zakrzepowo-zatorowych
- obrz?ki ko?czyn dolnych (pooperacyjne i pourazowe, limfatyczne, obrz?ki przy nadwadze, idiopatyczne obrz?ki ko?czyn dolnych)
- wsparcie kompresyjne po skleroterapii ?ylaków ko?czyn dolnych
- wsparcie kompresyjne po chirurgicznym usuni?ciu ?ylaków (chirurgia klasyczna, ablacja radiowa lub ablacja -laserowa ?ylaków)
- zakrzepica podczas podró?y

PRZECIWSKAZANIA:

- uci??liwe s?cz?ce si? uszkodzenia skóry
- ostre niedokrwienie ko?czyn
- krytyczne niedokrwienie ko?czyn
- zdekompensowana niewydolno?? serca
- bolesny obrz?k siniczny i bolesny obrz?k bia?y
- nadwra?liwo?? na u?yte materia?y
- zaburzenia czucia ko?czyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

Zdj?cie na danej aukcji jest nieaktualne, poniewa? producent nie dodaje ju? dodatku srebra do produktu. Nowe opakowanie nie zawiera oznaczenia Sanitized Silver.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. U?YWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJ? U?YWANIA LUB ETYKIET?.









Warianty produktu



Rozmiar S Normal

129,90 zł

Rozmiar S Normal

	Rozmiar S Long Rozmiar S Long	129,90 zł
	Rozmiar M Normal Rozmiar M Normal	129,90 zł
	Rozmiar M Long Rozmiar M Long	129,90 zł
	Rozmiar L Normal Rozmiar L Normal	129,90 zł
	Rozmiar L Long Rozmiar L Long	129,90 zł
	Rozmiar XL Normal Rozmiar XL Normal	129,90 zł
	Rozmiar XL Long Rozmiar XL Long	129,90 zł
	Rozmiar XXL Normal Rozmiar XXL Normal	129,90 zł



Rozmiar XXL Long

129,90 zł

Rozmiar XXL Long

Galeria

