

## JOBST Bellavar Pończochy krótkie CCL 2, palce odkryte



Cena: 269,00 zł

### Opis słownikowy

CZAS DOSTAWY 2-10 dni

PRODUCENT JOBST

### Opis produktu

**Pończochy uciskowe krótkie JOBST Bellavar CCL2 (2 klasa kompresji)** to pończochy skuteczności medycznej z maksymalnym bezpieczeństwem terapii. Idealne dla kobiet i mężczyzn cenionych skutecznością, bezpieczeństwem oraz wytrzymałością produktów uciskowych.

Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji gwarantują największy ucisk w okolicy stawu skokowego, słabnący w kierunku łydki. Usprawnia to naturalne krążenie krwi w celu leczenia i profilaktyki chorób łydek. W efekcie ograniczony zostaje obrzęk nogi i następuje zmniejszenie widoczności żyłaków. Pończochy przeciwżyłakowe JOBST Bellavar to bezpieczne dla zdrowia i skuteczne produkty pod kątem długoterminowej terapii.

### SZCZEGÓŁY:

**KLASA KOMPRESJI:** II (23-32 mmHg)

**WERSJA:** Palce odkryte

**DOSTĘPNE KOLORY:** Sahara, Pearl

**PRZEZNACZENIE:** dla kobiet, dla mężczyzn

**SKŁAD:** 63% poliamid, 37% elastan

**OPAKOWANIE:** 1 para



### Mocny ucisk

Duży stopień ucisku oferuje maksymalną skuteczność i bezpieczeństwo terapii. Mocna i stabilna dzianina wzmacnia i pomaga modelować kończynę zgodnie z założeniami terapii.



### Wytrzymałe

Wysoka sprężystość materiału sprawia, że produkty są wyjątkowo trwałe i wytrzymałe

## WSKAZANIA:

- Ciężkie i opuchnięte nogi
- Pajęczki
- Żylaki
- Przewlekła niewydolność żylna
- Profilaktyka

Więcej informacji na temat wskazań znajduje się w instrukcji użytkowania.

## JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

### Zmierz nogi w następujących miejscach:

1. Obwód w najwęższym miejscu nad kostką (cB)
2. Obwód w najszerszym miejscu w łydce (cC)
3. Obwód 2 cm pod kolanem (cD)
4. Obwód w połowie uda (cF)
5. Obwód 3 cm poniżej pośladka (cG)
  
6. Zmierz długość nogi – mierzymy na bosą, prosto postawioną stopę na podłodze, po wewnętrznej stronie nogi, od podłogi do 3 cm poniżej pośladka

## Tabela rozmiarów

Obwód w cm							Przeгляд wszystkich obwodów i długości
Punkt pomiaru ▼	Rozmiary						
	I	II	III	IV	V	VI	
cG	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64	
cF	39-41	42-44	45-47	48-50	51-53	54-56	
cE	29-31	32-34	35-37	38-40	41-43	44-46	
cD	26-28	29-31	32-34	35-37	38-40	41-43	
cC	29-30	31-33	34-36	37-39	40-42	43-45	
cB'	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32	33-34	
cY	27-28	29-30	31-32	33-34	35-36	37-38	
cA+cB	18-19	20-21	22-23	24-25	26-27	28-29	
Długość w cm							
AD	Długość	I/D	Regular	40-43	Petite	36-39	
AF		I/F	58-62				
AG		I/G	69-74				
AT / AG-T		I/K	Regular	76-80	Petite	70-75	

Rozmiar stopy AD z zamkniętym czubkiem  
 długi od rozmiaru obuwia 40; krótki do rozmiaru obuwia 39

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

## SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie produktów uciskowych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie piąty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piąty, nosić w odpowiednim obuwiu oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

## SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródła ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

## BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedrożność tętnic
- Niewyrównana niewydolność serca
- Septyczne zapalenie żyły

## WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Szczerce dermatozy
- Uczulenie na materiał, z którego wykonana jest pończocha uciskowa
- Zaburzenia czucia w kończynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozległe zapalenie stawów

## OSTRZEŻENIE:

Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie produktów medycznych uciskowych II klasy kompresji nale?y skonsultowa? z lekarzem. W razie wyst?pienia ostrego bólu lub podra?nienia skóry trzeba zaprzesta? noszenia i zg?osi? to lekarzowi..

## Parametry

DŁUGOŚĆ	Petite, Regular
KOLOR	Sahara (Sahara), Perłowy (Pearl)
ROZMIAR	1, 2, 3, 4, 5, 6
WERSJA	Palce odkryte

## Galeria



### Kolory standardowe



### Taśmy stabilizujące zewnętrzne/wewnętrzne



### Przegląd produktów

Wzrost	160-170 cm	170-180 cm	180-190 cm	190-200 cm
CCL 3 23-32 cm	●	●	●	●
CCL 3 34-46 cm	●	●	●	●
Tętno	●	●	●	●
Typ	●	●	●	●
Styl	●	●	●	●
Wskazywana cięciwa	para	para	para	szafa
Wskazywana długość	para	para	para	szafa

**Max cięciwa:** 40 cm (długość 19 cm), 45 cm (długość 21 cm), 50 cm (długość 23 cm), 55 cm (długość 25 cm), 60 cm (długość 27 cm), 65 cm (długość 29 cm), 70 cm (długość 31 cm), 75 cm (długość 33 cm), 80 cm (długość 35 cm), 85 cm (długość 37 cm), 90 cm (długość 39 cm), 95 cm (długość 41 cm), 100 cm (długość 43 cm), 105 cm (długość 45 cm), 110 cm (długość 47 cm), 115 cm (długość 49 cm), 120 cm (długość 51 cm), 125 cm (długość 53 cm), 130 cm (długość 55 cm), 135 cm (długość 57 cm), 140 cm (długość 59 cm), 145 cm (długość 61 cm), 150 cm (długość 63 cm), 155 cm (długość 65 cm), 160 cm (długość 67 cm), 165 cm (długość 69 cm), 170 cm (długość 71 cm), 175 cm (długość 73 cm), 180 cm (długość 75 cm), 185 cm (długość 77 cm), 190 cm (długość 79 cm), 195 cm (długość 81 cm), 200 cm (długość 83 cm), 205 cm (długość 85 cm), 210 cm (długość 87 cm), 215 cm (długość 89 cm), 220 cm (długość 91 cm), 225 cm (długość 93 cm), 230 cm (długość 95 cm), 235 cm (długość 97 cm), 240 cm (długość 99 cm), 245 cm (długość 101 cm), 250 cm (długość 103 cm), 255 cm (długość 105 cm), 260 cm (długość 107 cm), 265 cm (długość 109 cm), 270 cm (długość 111 cm), 275 cm (długość 113 cm), 280 cm (długość 115 cm), 285 cm (długość 117 cm), 290 cm (długość 119 cm), 295 cm (długość 121 cm), 300 cm (długość 123 cm), 305 cm (długość 125 cm), 310 cm (długość 127 cm), 315 cm (długość 129 cm), 320 cm (długość 131 cm), 325 cm (długość 133 cm), 330 cm (długość 135 cm), 335 cm (długość 137 cm), 340 cm (długość 139 cm), 345 cm (długość 141 cm), 350 cm (długość 143 cm), 355 cm (długość 145 cm), 360 cm (długość 147 cm), 365 cm (długość 149 cm), 370 cm (długość 151 cm), 375 cm (długość 153 cm), 380 cm (długość 155 cm), 385 cm (długość 157 cm), 390 cm (długość 159 cm), 395 cm (długość 161 cm), 400 cm (długość 163 cm), 405 cm (długość 165 cm), 410 cm (długość 167 cm), 415 cm (długość 169 cm), 420 cm (długość 171 cm), 425 cm (długość 173 cm), 430 cm (długość 175 cm), 435 cm (długość 177 cm), 440 cm (długość 179 cm), 445 cm (długość 181 cm), 450 cm (długość 183 cm), 455 cm (długość 185 cm), 460 cm (długość 187 cm), 465 cm (długość 189 cm), 470 cm (długość 191 cm), 475 cm (długość 193 cm), 480 cm (długość 195 cm), 485 cm (długość 197 cm), 490 cm (długość 199 cm), 495 cm (długość 201 cm), 500 cm (długość 203 cm), 505 cm (długość 205 cm), 510 cm (długość 207 cm), 515 cm (długość 209 cm), 520 cm (długość 211 cm), 525 cm (długość 213 cm), 530 cm (długość 215 cm), 535 cm (długość 217 cm), 540 cm (długość 219 cm), 545 cm (długość 221 cm), 550 cm (długość 223 cm), 555 cm (długość 225 cm), 560 cm (długość 227 cm), 565 cm (długość 229 cm), 570 cm (długość 231 cm), 575 cm (długość 233 cm), 580 cm (długość 235 cm), 585 cm (długość 237 cm), 590 cm (długość 239 cm), 595 cm (długość 241 cm), 600 cm (długość 243 cm), 605 cm (długość 245 cm), 610 cm (długość 247 cm), 615 cm (długość 249 cm), 620 cm (długość 251 cm), 625 cm (długość 253 cm), 630 cm (długość 255 cm), 635 cm (długość 257 cm), 640 cm (długość 259 cm), 645 cm (długość 261 cm), 650 cm (długość 263 cm), 655 cm (długość 265 cm), 660 cm (długość 267 cm), 665 cm (długość 269 cm), 670 cm (długość 271 cm), 675 cm (długość 273 cm), 680 cm (długość 275 cm), 685 cm (długość 277 cm), 690 cm (długość 279 cm), 695 cm (długość 281 cm), 700 cm (długość 283 cm), 705 cm (długość 285 cm), 710 cm (długość 287 cm), 715 cm (długość 289 cm), 720 cm (długość 291 cm), 725 cm (długość 293 cm), 730 cm (długość 295 cm), 735 cm (długość 297 cm), 740 cm (długość 299 cm), 745 cm (długość 301 cm), 750 cm (długość 303 cm), 755 cm (długość 305 cm), 760 cm (długość 307 cm), 765 cm (długość 309 cm), 770 cm (długość 311 cm), 775 cm (długość 313 cm), 780 cm (długość 315 cm), 785 cm (długość 317 cm), 790 cm (długość 319 cm), 795 cm (długość 321 cm), 800 cm (długość 323 cm), 805 cm (długość 325 cm), 810 cm (długość 327 cm), 815 cm (długość 329 cm), 820 cm (długość 331 cm), 825 cm (długość 333 cm), 830 cm (długość 335 cm), 835 cm (długość 337 cm), 840 cm (długość 339 cm), 845 cm (długość 341 cm), 850 cm (długość 343 cm), 855 cm (długość 345 cm), 860 cm (długość 347 cm), 865 cm (długość 349 cm), 870 cm (długość 351 cm), 875 cm (długość 353 cm), 880 cm (długość 355 cm), 885 cm (długość 357 cm), 890 cm (długość 359 cm), 895 cm (długość 361 cm), 900 cm (długość 363 cm), 905 cm (długość 365 cm), 910 cm (długość 367 cm), 915 cm (długość 369 cm), 920 cm (długość 371 cm), 925 cm (długość 373 cm), 930 cm (długość 375 cm), 935 cm (długość 377 cm), 940 cm (długość 379 cm), 945 cm (długość 381 cm), 950 cm (długość 383 cm), 955 cm (długość 385 cm), 960 cm (długość 387 cm), 965 cm (długość 389 cm), 970 cm (długość 391 cm), 975 cm (długość 393 cm), 980 cm (długość 395 cm), 985 cm (długość 397 cm), 990 cm (długość 399 cm), 995 cm (długość 401 cm), 1000 cm (długość 403 cm)

### Tabela rozmiarów

Płeć	Długość				Przebieg choroby żył
	1	2	3	4	
1M	42-44	44-46	46-47	47-48	48-50
1F	38-40	40-42	42-44	44-46	46-48
2M	44-46	46-48	48-50	50-52	52-54
2F	40-42	42-44	44-46	46-48	48-50
3M	46-48	48-50	50-52	52-54	54-56
3F	42-44	44-46	46-48	48-50	50-52
4M	48-50	50-52	52-54	54-56	56-58
4F	44-46	46-48	48-50	50-52	52-54
5M	50-52	52-54	54-56	56-58	58-60
5F	46-48	48-50	50-52	52-54	54-56
6M	52-54	54-56	56-58	58-60	60-62
6F	48-50	50-52	52-54	54-56	56-58
7M	54-56	56-58	58-60	60-62	62-64
7F	50-52	52-54	54-56	56-58	58-60
8M	56-58	58-60	60-62	62-64	64-66
8F	52-54	54-56	56-58	58-60	60-62
9M	58-60	60-62	62-64	64-66	66-68
9F	54-56	56-58	58-60	60-62	62-64
10M	60-62	62-64	64-66	66-68	68-70
10F	56-58	58-60	60-62	62-64	64-66
11M	62-64	64-66	66-68	68-70	70-72
11F	58-60	60-62	62-64	64-66	66-68

### Przewidziane zastosowanie

Przewidziane choroby żył	C1	C2	C3
Przewidziane choroby żył	●	●	●

### Przewidziane zastosowanie

Przewidziane choroby żył	C1	C2	C3
Przewidziane choroby żył	●	●	●

