

JOBST Opaque Pończochy CCL 1, palce odkryte, kolor natural, długość petite, silikonowe kropki



Cena od: 259,99 zł

Opis słownikowy

CZAS DOSTAWY 2-10 dni

PRODUCENT JOBST

Opis produktu

Pończochy uciskowe JOBST Opaque CCL1 (1 klasa kompresji) to połączenie funkcjonalności z wyjątkowo miłym, bardzo przyjemnym w noszeniu materiałem. Delikatna, nieprzezroczysta tkanina dyskretnie ukrywa niedoskonałości, zapewniając efektywną ochronę przed wilgocią i ułatwiając codzienne zakładanie.

NOWE OPAKOWANIA JOBST

Marka JOBST zmienia opakowania produktów - unikalny design i nowa kolorystyka, aby w prosty sposób identyfikować linie produktowe i potrzeby pacjentów. Produkt wewnątrz jest ciągle ten sam, nie zmienia się. Zmiana jest sukcesywna i płynna, więc w ramach zamówienia może być wysłane dotychczasowe opakowanie lub nowe, w zależności czy dany produkt został już wyprodukowany w nowym opakowaniu.

SZCZEGÓŁY:

KLASA KOMPRESJI: I (18-21 mmHg)

DŁUGOŚCI: Petite

WERSJA: Palce odkryte

KOLOR: Natural (Naturalny)

WYKOŃCZENIE MANKIETU: Silikonowe Kropki

PRZEZNACZENIE: dla kobiet, dla mężczyzn

SKŁAD: 64% poliamid, 36% elastan

OPAKOWANIE: 1 para



Kryjące

Maskują drobne niedoskonałości i zapewniają stylowy wygląd.



Odprowadzają wilgoć

Pomagają utrzymać skórę w suchości przez cały dzień.



Soft Touch

Mieszanka delikatnych dla skóry włókien

WSKAZANIA:

- Ciężkie i opuchnięte nogi
- Pajęczki
- Żylaki
- Przewlekła choroba żylna
- Profilaktyka

Więcej informacji na temat wskazań znajduje się w instrukcji użytkowania.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Zmierz nogi w następujących miejscach:

1. Obwód w najwęższym miejscu nad kostką (cB)
2. Obwód w najszerszym miejscu w łydce (cC)
3. Obwód 2 cm pod kolanem (cD)
4. Obwód w połowie uda (cF)
5. Obwód 3 cm poniżej pośladka (cG)
6. Zmierz długość nogi – mierzymy na boso, prosto postawionym stopem na podłodze, po wewnętrznej stronie nogi, od podłogi do 3 cm poniżej pośladka

Tabela rozmiarów

Obwód w cm							Przeгляд wszystkich obwodów i długości
Punkt pomiaru ▼	Rozmiary						
	I	II	III	IV	V	VI	
cG Standard	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	
cG Szerokie	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	
cB'	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Długość w cm							
AD	Długość	/D	Regular	39-45	Petite	34-39	
AG		/G	Regular	70-80	Petite	60-69	
AT / AG-T		/K	Regular	75-85	Petite	65-75	
Max. część brzuszna Zalecenia w zależności od rozmiaru	I	od talii 80, bioder 95		IV-V	od talii 110, bioder 125		
	II-III	od talii 90, bioder 105		VI	od talii 120, bioder 135		

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyny dolnych.

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie produktów uciskowych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięt. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie.

Suszy? w stanie roz?o?onym z daleka od ?róde? ciep?a. Przechowywa? w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

BEZWZGL?DNE PRZECIWWSKAZANIA:

- Zaawansowana obwodowa niedro?no?? t?tnic
- Niewyrównana niewydolno?? serca
- Septyczne zapalenie ?y?

WZGL?DNE PRZECIWWSKAZANIA:




- S?cz?ce dermatozy
- Uczulenie na materia?, z którego wykonana jest po?czocho uciskowa
- Zaburzenia czucia w ko?czynach
- Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
- Pierwotne rozleg?e zapalenie stawów

OSTRZE?ENIE:

Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie produktów medycznych uciskowych II klasy kompresji nale?y skonsultowa? z lekarzem. W razie wyst?pienia ostrego bólu lub podra?nienia skóry trzeba zaprzesta? noszenia i zg?osi? to lekarzowi.

To jest wyrób medyczny. U?ywaj go zgodnie z instrukcj? u?ywania lub etykiet?.

Warianty produktu

	Rozmiar 1, długość petite Rozmiar 1, długość petite	259,99 zł
	Rozmiar 2, długość petite Rozmiar 2, długość petite	259,99 zł
	Rozmiar 3, długość petite Rozmiar 3, długość petite	259,99 zł



Rozmiar 4, długość petite
 Rozmiar 4, długość petite

259,99 zł



Rozmiar 5, długość petite
 Rozmiar 5, długość petite

259,99 zł



Rozmiar 6, długość petite
 Rozmiar 6, długość petite

259,99 zł

Galeria



Opcje wykończenia Zewnętrzne/wewnętrzne



Przewidziane zastosowanie

Przeznaczenie	Przeznaczenie	Przeznaczenie	Przeznaczenie	Przeznaczenie
CP	CP	CP	CP	CP
Przeznaczenie	Przeznaczenie	Przeznaczenie	Przeznaczenie	Przeznaczenie

Tabela rozmiarów

Wzrost	Ciepłota				Przebieg			
	1	2	3	4	1	2	3	4
150-155	45-50	50-55	55-60	60-65	45-50	50-55	55-60	60-65
155-160	45-50	50-55	55-60	60-65	45-50	50-55	55-60	60-65
160-165	45-50	50-55	55-60	60-65	45-50	50-55	55-60	60-65
165-170	45-50	50-55	55-60	60-65	45-50	50-55	55-60	60-65
170-175	45-50	50-55	55-60	60-65	45-50	50-55	55-60	60-65
175-180	45-50	50-55	55-60	60-65	45-50	50-55	55-60	60-65
180-185	45-50	50-55	55-60	60-65	45-50	50-55	55-60	60-65
185-190	45-50	50-55	55-60	60-65	45-50	50-55	55-60	60-65
190-195	45-50	50-55	55-60	60-65	45-50	50-55	55-60	60-65
195-200	45-50	50-55	55-60	60-65	45-50	50-55	55-60	60-65

Przebieg produktów

Kod produktu	Szerokość			
	XS	S	M	L
001-001-001-001	●	●	●	●
001-001-001-002	●	●	●	●
001-001-001-003	●	●	●	●
001-001-001-004	●	●	●	●
001-001-001-005	●	●	●	●
001-001-001-006	●	●	●	●
001-001-001-007	●	●	●	●
001-001-001-008	●	●	●	●
001-001-001-009	●	●	●	●
001-001-001-010	●	●	●	●
001-001-001-011	●	●	●	●
001-001-001-012	●	●	●	●
001-001-001-013	●	●	●	●
001-001-001-014	●	●	●	●
001-001-001-015	●	●	●	●
001-001-001-016	●	●	●	●
001-001-001-017	●	●	●	●
001-001-001-018	●	●	●	●
001-001-001-019	●	●	●	●
001-001-001-020	●	●	●	●
001-001-001-021	●	●	●	●
001-001-001-022	●	●	●	●
001-001-001-023	●	●	●	●
001-001-001-024	●	●	●	●
001-001-001-025	●	●	●	●
001-001-001-026	●	●	●	●
001-001-001-027	●	●	●	●
001-001-001-028	●	●	●	●
001-001-001-029	●	●	●	●
001-001-001-030	●	●	●	●
001-001-001-031	●	●	●	●
001-001-001-032	●	●	●	●
001-001-001-033	●	●	●	●
001-001-001-034	●	●	●	●
001-001-001-035	●	●	●	●
001-001-001-036	●	●	●	●
001-001-001-037	●	●	●	●
001-001-001-038	●	●	●	●
001-001-001-039	●	●	●	●
001-001-001-040	●	●	●	●
001-001-001-041	●	●	●	●
001-001-001-042	●	●	●	●
001-001-001-043	●	●	●	●
001-001-001-044	●	●	●	●
001-001-001-045	●	●	●	●
001-001-001-046	●	●	●	●
001-001-001-047	●	●	●	●
001-001-001-048	●	●	●	●
001-001-001-049	●	●	●	●
001-001-001-050	●	●	●	●
001-001-001-051	●	●	●	●
001-001-001-052	●	●	●	●
001-001-001-053	●	●	●	●
001-001-001-054	●	●	●	●
001-001-001-055	●	●	●	●
001-001-001-056	●	●	●	●
001-001-001-057	●	●	●	●
001-001-001-058	●	●	●	●
001-001-001-059	●	●	●	●
001-001-001-060	●	●	●	●
001-001-001-061	●	●	●	●
001-001-001-062	●	●	●	●
001-001-001-063	●	●	●	●
001-001-001-064	●	●	●	●
001-001-001-065	●	●	●	●
001-001-001-066	●	●	●	●
001-001-001-067	●	●	●	●
001-001-001-068	●	●	●	●
001-001-001-069	●	●	●	●
001-001-001-070	●	●	●	●
001-001-001-071	●	●	●	●
001-001-001-072	●	●	●	●
001-001-001-073	●	●	●	●
001-001-001-074	●	●	●	●
001-001-001-075	●	●	●	●
001-001-001-076	●	●	●	●
001-001-001-077	●	●	●	●
001-001-001-078	●	●	●	●
001-001-001-079	●	●	●	●
001-001-001-080	●	●	●	●
001-001-001-081	●	●	●	●
001-001-001-082	●	●	●	●
001-001-001-083	●	●	●	●
001-001-001-084	●	●	●	●
001-001-001-085	●	●	●	●
001-001-001-086	●	●	●	●
001-001-001-087	●	●	●	●
001-001-001-088	●	●	●	●
001-001-001-089	●	●	●	●
001-001-001-090	●	●	●	●
001-001-001-091	●	●	●	●
001-001-001-092	●	●	●	●
001-001-001-093	●	●	●	●
001-001-001-094	●	●	●	●
001-001-001-095	●	●	●	●
001-001-001-096	●	●	●	●
001-001-001-097	●	●	●	●
001-001-001-098	●	●	●	●
001-001-001-099	●	●	●	●
001-001-001-100	●	●	●	●

-  **Kryjące**
Maskują drobne niedoskonałości i zapewniają stylowy wygląd.
-  **Odprowadzają wilgoć**
Pomagają utrzymać skórę w suchości przez cały dzień.
-  **Soft Touch**
Mieszanka delikatnych dla skóry włókien

