

## PANI TERESA CLASSIC podkolanówki uciskowe CCL 1 czarny czubki zamknięte

Cena od: 48,99 zł



Opis produktu

### Podkolanówki uciskowe Pani Teresa CLASSIC I klasa

**ucisku** to mi?kkie, komfortowe podkolanówki kompresyjne produkowane przy u?yciu zaawansowanych technologii i najwy?szej jako?ci wyko?czenia. Wspomagaj? prawid?owe dzia?anie zastawek ?ylnych, stabilizuj? kr??enie krwi i s? niezast?pionym elementem terapii uciskowej.

#### **SZCZEGÓ?Y:**

KLASA KOMPRESJI: I (15-21 mmHg)

SK?AD: 79% poliamid, 21% elastan

WERSJA: Palce zamkni?te

KOLOR: Czarne

D?UGO??I: Krótkie/D?ugie

## WYKOŃCZENIE MANKIETU: Lamówka

OPAKOWANIE: 1 para


Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kończynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki jest najwyższe i osiąga wartości 15 – 21 mmHg.

### **JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?**

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość we wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

# PANI TERESA® CLASSIC 1 KLASA KOMPRESJI

15 - 21 mmHg

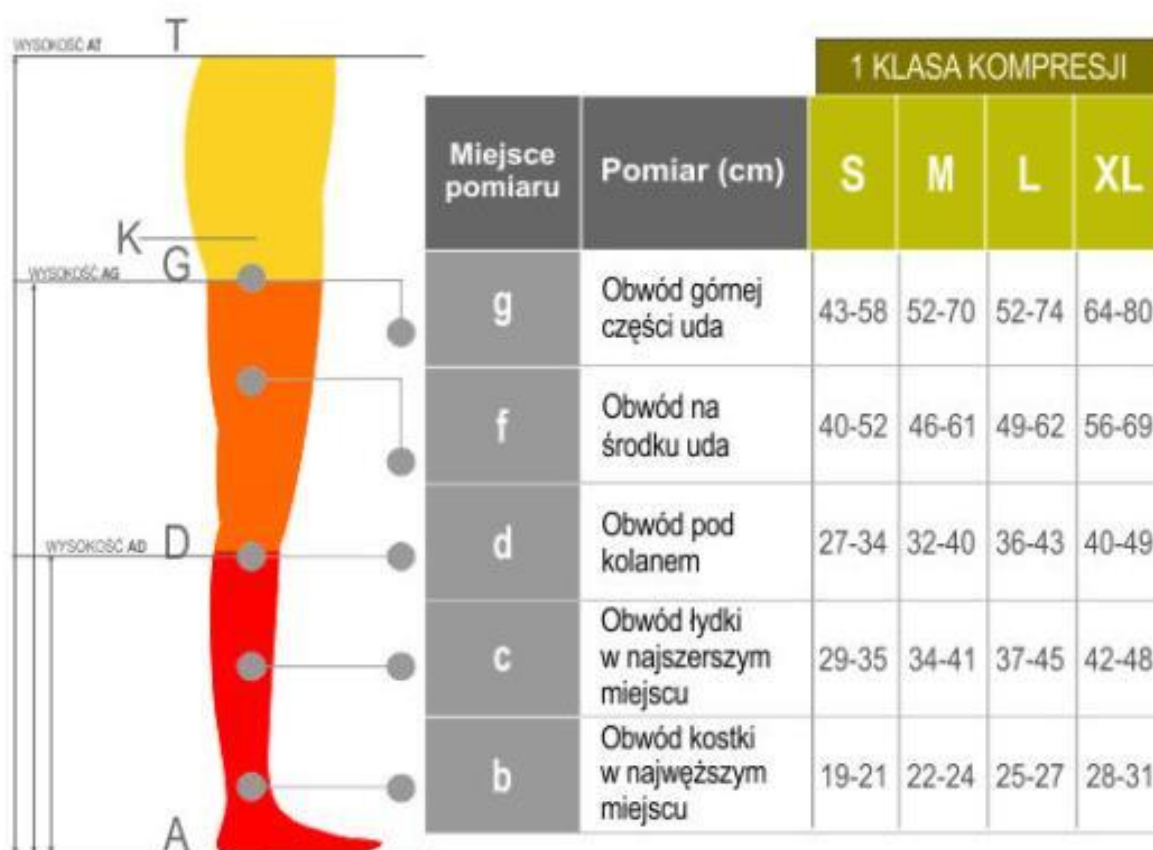

WYSOKOŚĆ	POMIAR	KRÓTKIE	DŁUGIE
RAJSTOPY	A-G	60 do 70 cm	71 do 83 cm
POŃCZOCHY	A-G	60 do 70 cm	71 do 83 cm
PODKOLANÓWKI	A-D	34 do 37 cm	38 do 44 cm

### **SPOSÓB ZAKŁADANIA:**

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięt. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z zakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

### **SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:**

Prać ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródła ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

### **WSKAZANIA:**

- lekka niewydolność żylna
- przewlekła niewydolność żylna
- zakrzepowe zapalenie żył
- zakrzepica żył powierzchniowych (przy obrzękach lub bez)
- stany po skleroterapii
- po operacji żyłaków i po strippingu
- żyłaki pojawiające się w okresie ciąży
- profilaktyka zatorów
- profilaktyka zakrzepicy

### **PRZECIWSKAZANIA:**

- ostre zapalenie tkanki podskórnej
- infekcje skórne
- obliteracja arteriopatii obwodowej
- stwierdzona alergia na skład wyrobu

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**








Warianty produktu



Rozmiar S Długie

Rozmiar S Długie

48,99 zł

	Rozmiar S Krótkie Rozmiar S Krótkie	48,99 zł
	Rozmiar M Długie Rozmiar M Długie	48,99 zł
	Rozmiar M Krótkie Rozmiar M Krótkie	48,99 zł
	Rozmiar L Długie Rozmiar L Długie	48,99 zł
	Rozmiar L Krótkie Rozmiar L Krótkie	48,99 zł
	Rozmiar XL Długie Rozmiar XL Długie	48,99 zł
	Rozmiar XL Krótkie Rozmiar XL Krótkie	48,99 zł

## Galeria

