

PANI TERESA CLASSIC pończochy uciskowe CCL 1 jasny beż czubki otwarte

Cena od: 84,99 zł



Opis produktu

Pończochy uciskowe Pani Teresa CLASSIC I klasa

ucisku to miękkie, komfortowe pończochy kompresyjne produkowane przy użyciu zaawansowanych technologii i najwyższej jakości wykończenia. Wspomagają prawidłowe działanie zastawek żylnych, stabilizują krążenie krwi i są niezastąpionym elementem terapii uciskowej.

SZCZEGÓŁY:

KLASA KOMPRESJI: I (15-21 mmHg)

SKŁAD: 79% poliamid, 21% elastan

WERSJA: Palce otwarte

WYKOŃCZENIE MANKIETU: Samonocny w kropki

KOLOR: Jasny beż

DŁUGOŚĆ: Krótkie/Długie

WYKOŹCZENIE MANKIETU: Lamówka

OPAKOWANIE: 1 para


Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kośćczynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki jest najwyższe i osiąga wartości 15 – 21 mmHg.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kośćczynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kośćczyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość we wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

PANI TERESA® CLASSIC 1 KLASA KOMPRESJI

15 - 21 mmHg

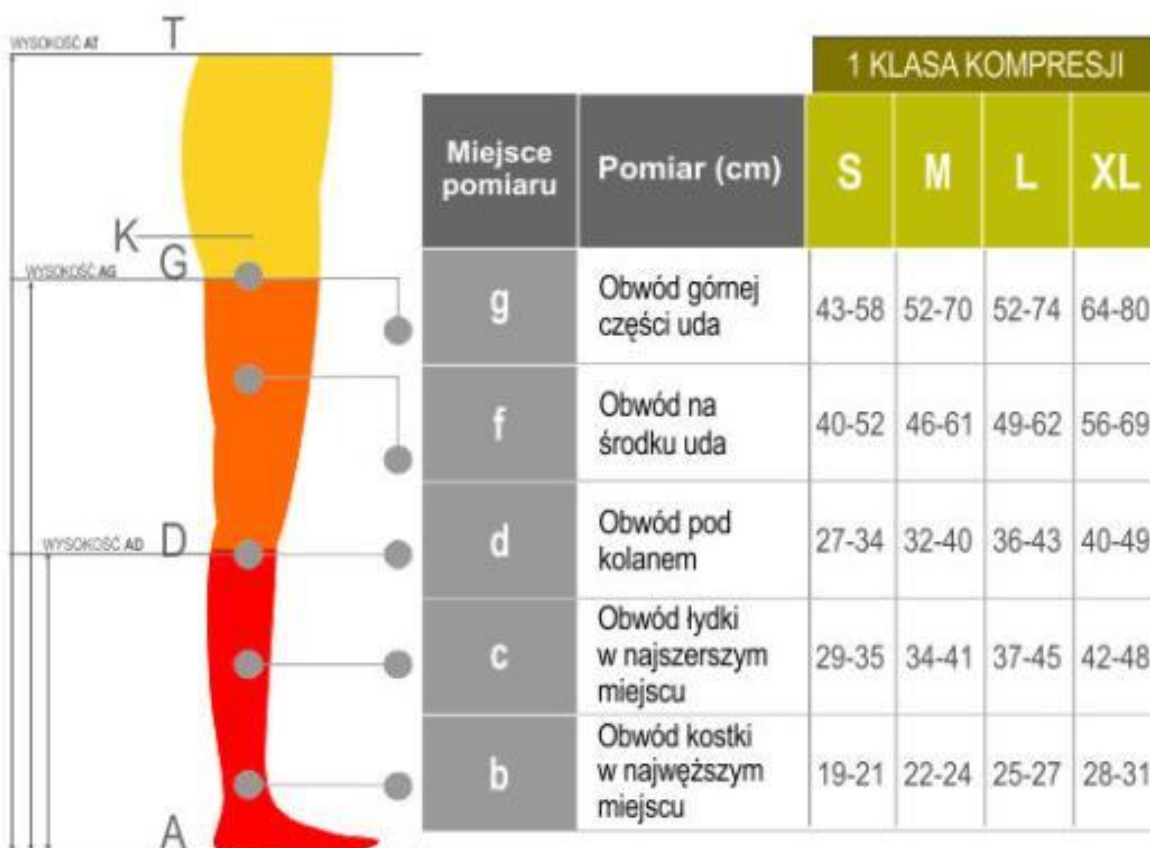

WYSOKOŚĆ	POMIAR	KRÓTKIE	DŁUGIE
RAJSTOPY	A-G	60 do 70 cm	71 do 83 cm
POŃCZOCHY	A-G	60 do 70 cm	71 do 83 cm
PODKOLANÓWKI	A-D	34 do 37 cm	38 do 44 cm

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięt. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z zakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródła ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

WSKAZANIA:

- lekka niewydolność żylna
- przewlekła niewydolność żylna
- zakrzepowe zapalenie żył
- zakrzepica żył powierzchniowych (przy obrzękach lub bez)
- stany po skleroterapii
- po operacji żyłaków i po strippingu
- żyłaki pojawiające się w okresie ciąży
- profilaktyka zatorów
- profilaktyka zakrzepicy

PRZECIWSKAZANIA:

- ostre zapalenie tkanki podskórnej
- infekcje skórne
- obliteracja arteriopatii obwodowej
- stwierdzona alergia na skład wyrobu

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Warianty produktu



Rozmiar S Długość

84,99 zł

Rozmiar S Długość



Rozmiar S Krótkie

84,99 zł

Rozmiar S Krótkie



Rozmiar M Długie

84,99 zł

Rozmiar M Długie



Rozmiar M Krótkie

84,99 zł

Rozmiar M Krótkie



Rozmiar L Długie

84,99 zł

Rozmiar L Długie



Rozmiar L Krótkie

84,99 zł

Rozmiar L Krótkie



Rozmiar XL Długie

84,99 zł

Rozmiar XL Długie



Rozmiar XL Krótkie

84,99 zł

Rozmiar XL Krótkie

Galeria

