

PANI TERESA CLASSIC rajstopy uciskowe CCL 1 ciemny beż czubki zamknięte

Cena od: 80,99 zł



Opis produktu

Rajstopy uciskowe Pani Teresa CLASSIC I klasa

ucisku to mi?kkie, komfortowe rajstopy kompresyjne produkowane przy u?yciu zaawansowanych technologii i najwy?szej jako?ci wyko?czenia. Wspomagaj? prawid?owe dzia?anie zastawek ?ylnych, stabilizuj? kr??enie krwi i s? niezast?pionym elementem terapii uciskowej.

SZCZEGÓ?Y:

KLASA KOMPRESJI: I (15-21 mmHg)

SK?AD: 78% poliamid, 22% elastan

WERSJA: Palce zamkni?te

KOLOR: Ciemny be?

D?UGO??I: Krótkie/D?ugie

OPAKOWANIE: 1 para


Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kośćczynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki jest najwyższe i osiąga wartości 15 – 21 mmHg.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kośćczynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kośćczyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość we wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

PANI TERESA® CLASSIC 1 KLASA KOMPRESJI

15 - 21 mmHg

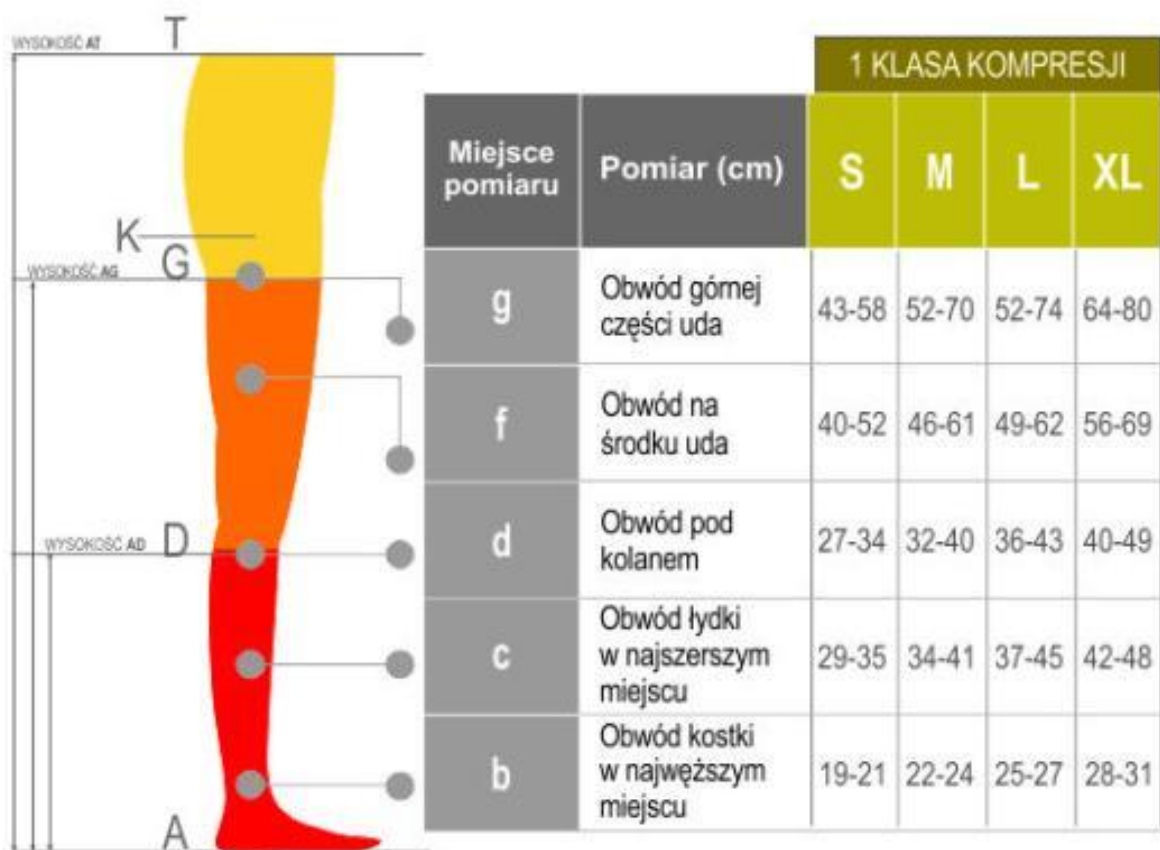

| WYSOKOŚĆ | POMIAR | KRÓTKIE | DŁUGIE |
|--------------|--------|-------------|-------------|
| RAJSTOPY | A-G | 60 do 70 cm | 71 do 83 cm |
| POŃCZOCHY | A-G | 60 do 70 cm | 71 do 83 cm |
| PODKOLANÓWKI | A-D | 34 do 37 cm | 38 do 44 cm |

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie piąty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piąty, nosić w odpowiednim obuwiu oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródła ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

WSKAZANIA:

- lekka niewydolność żylna
- przewlekła niewydolność żylna
- zakrzepowe zapalenie żył
- zakrzepica żył powierzchownych (przy obrzękach lub bez)
- stany po skleroterapii
- po operacji żyłaków i po strippingu
- żyłaki pojawiające się w okresie ciąży
- profilaktyka zatorów
- profilaktyka zakrzepicy

PRZECIWSKAZANIA:

- ostre zapalenie tkanki podskórnej
- infekcje skórne
- obliteracja arteriopatii obwodowa
- stwierdzona alergia na skład wyrobu

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Warianty produktu



Rozmiar S Długie

Rozmiar S Długie

80,99 zł



Rozmiar S Krótkie

80,99 zł

Rozmiar S Krótkie



Rozmiar M Długie

80,99 zł

Rozmiar M Długie



Rozmiar M Krótkie

80,99 zł

Rozmiar M Krótkie



Rozmiar L Długie

80,99 zł

Rozmiar L Długie



Rozmiar L Krótkie

80,99 zł

Rozmiar L Krótkie



Rozmiar XL Długie

80,99 zł

Rozmiar XL Długie



Rozmiar XL Krótkie

80,99 zł

Rozmiar XL Krótkie

Galeria

