

VEERA FORTE podkolanówki uciskowe II klasa ucisku otwarte krótkie czarne



Cena od: 66,50 zł

Opis produktu

Podkolanówki uciskowe VEERA Forte II klasa

ucisku to miękkie, komfortowe podkolanówki kompresyjne produkowane przy użyciu zaawansowanych technologii i najwyższej jakości wykończenia. Produkt jest kryjący, ma właściwości antybakteryjne, antygrzybicze, antyalergiczne i antyzapachowe.

SZCZEGÓŁY:

KLASA KOMPRESJI: II (23-32 mmHg)

SKŁAD: 76% poliamid, 24% lycra

WERSJA: Palce otwarte

KOLOR: Czarny

DŁUGOŚĆ: Krótkie

WYKOŹCZENIE MANKIETU: Lamówka

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kośćczynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki jest najwyższe i osiąga wartości 23 – 32 mmHg.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kośćczynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kośćczyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość we wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięt. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować pięty, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszcza się do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródła ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

WSKAZANIA:

- lekka niewydolność żylna
- przewlekła niewydolność żylna
- zakrzepowe zapalenie żył
- zakrzepica żył powierzchownych (przy obrzękach lub bez)
- stany po skleroterapii
- po operacji żyłaków i po strippingu
- żyłaki pojawiające się w okresie ciąży
- profilaktyka zatorów
- profilaktyka zakrzepicy

PRZECIWSKAZANIA:

- ostre zapalenie tkanki podskórnej
- infekcje skórne
- obliteracja arteriopatii obwodowej

-stwierdzona alergia na sk?ad wyrobu

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. U?YWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJ?
U?YWANIA LUB ETYKIET?.**

Warianty produktu



Rozmiar 1 Krótkie

66,50 zł

Rozmiar 1 Krótkie



Rozmiar 2 Krótkie

66,50 zł

Rozmiar 2 Krótkie



Rozmiar 3 Krótkie

66,50 zł

Rozmiar 3 Krótkie



Rozmiar 4 Krótkie

66,50 zł

Rozmiar 4 Krótkie



Rozmiar 5 Krótkie

66,50 zł

Rozmiar 5 Krótkie

Galeria

