

## VEERA FORTE pończochy uciskowe I klasa ucisku zamknięte krótkie karmel

Cena od: 86,99 zł



### Opis produktu

**Pończochy uciskowe VEERA Forte I klasa ucisku** to miękkie, komfortowe pończochy kompresyjne produkowane przy użyciu zaawansowanych technologii i najwyższej jakości wykończenia. Produkt jest kryjący, ma właściwości antibakteryjne, antygrzybicze, antyalergiczne i antyzapachowe.

#### **SZCZEGÓŁY:**

KLASA KOMPRESJI: I (18-21 mmHg)

SKŁAD: 76% poliamid, 24% lycra

WERSJA: Palce zamknięte

KOLOR: Karmel

DŁUGOŚĆ: Krótkie

WYKOŃCZENIE MANKIETU: Lamówka

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kończynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki jest największe i osiąga wartości 18 – 21 mmHg.

### JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobciążonej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długości we wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

## Sposób pomiaru

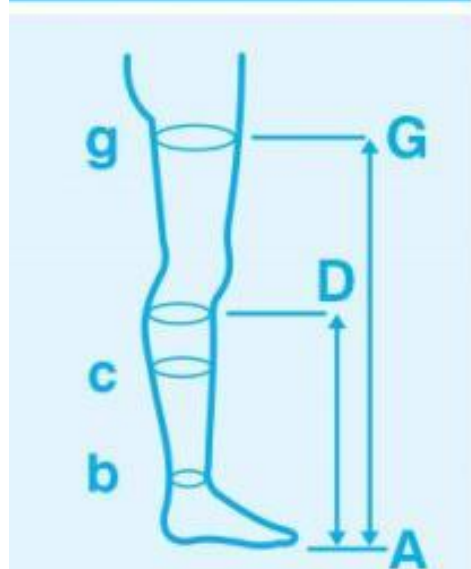


Tabela doboru rozmiaru

	kostka w najwęższym miejscu	łydka w najszerszym miejscu	udo 5 cm poniżej krocza				
	b	c	g	AD		AG	
1	19-21	29-34	48-58	krótka	długa	krótka	długa
2	21-23	32-37	52-60				
3	23-25	35-40	56-64	AD	AD	AG	AG
4	25-27	38-43	60-68	36-41	42-48	66-73	74-82
5	27-29	42-47	64-72				

### SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięt. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

### SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie

dopuszcza? do silnego zabrudzenia. Nie nale?y prasowa?, chlorowa?, wybiela? i czy?ci? chemicznie. Suszy? w stanie roz?o?onym z daleka od ?róde? ciep?a. Przechowywa? w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

### **WSKAZANIA:**




- lekka niewydolno?? ?ylna
- przewlek?a niewydolno?? ?ylna
- zakrzepowe zapalenie ?y?
- zakrzepica ?y? powierzchniowych (przy obrz?kach lub bez)
- stany po skleroterapii
- po operacji ?ylaków i po strippingu
- ?ylaki pojawiaj?ce si? w okresie ci??y
- profilaktyka zatorów
- profilaktyka zakrzepicy

### **PRZECIWSKAZANIA:**

- ostre zapalenie tkanki podskórnej
- infekcje skórne
- obliteracja arteriopatia obwodowa
- stwierdzona alergia na sk?ad wyrobu

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. U?YWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJ? U?YWANIA LUB ETYKIET?.**

#### Warianty produktu

	Rozmiar 1 Krótkie Rozmiar 1 Krótkie	86,99 zł
	Rozmiar 2 Krótkie Rozmiar 2 Krótkie	86,99 zł
	Rozmiar 3 Krótkie Rozmiar 3 Krótkie	86,99 zł



Rozmiar 4 Krótkie

86,99 zł

Rozmiar 4 Krótkie



Rozmiar 5 Krótkie

86,99 zł

Rozmiar 5 Krótkie

## Galeria

