

## VEERA FORTE rajstopy uciskowe I klasa ucisku zamknięte krótkie karmel

Cena od: 108,99 zł



### Opis produktu

**Rajstopy uciskowe VEERA Forte I klasa ucisku** to mi?kkie, komfortowe rajstopy kompresyjne produkowane przy u?yciu zaawansowanych technologii i najwy?szej jako?ci wyko?czenia. Produkt jest kryj?cy, ma w?a?ciwo?ci antybakteryjne, antygrzybicze, antyalergiczne i antyzapachowe.

#### **SZCZEGÓ?Y:**

KLASA KOMPRESJI: I (18-21 mmHg)

SK?AD: 76% poliamid, 24% lycra

WERSJA: Palce zamkni?te

KOLOR: Karmel

D?UGO??: Krótkie

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kończynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki jest największe i osiąga wartości 18 – 21 mmHg.

### JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobciążonej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość w wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

### Sposób pomiaru

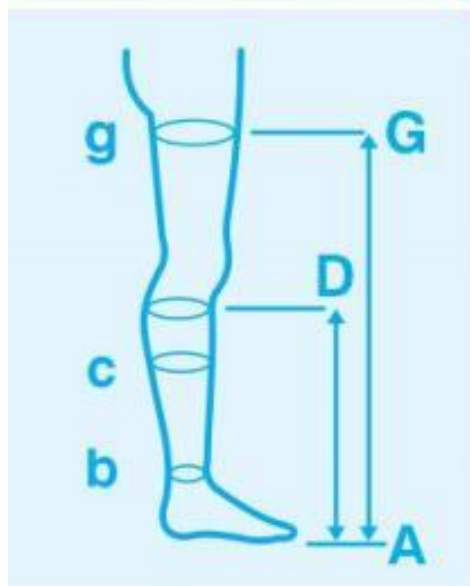


Tabela doboru rozmiaru

	kostka w największym miejscu	łydka w najszerszym miejscu	udo 5 cm poniżej krocza				
	b	c	g	AD		AG	
1	19-21	29-34	48-58	krótka	długa	krótka	długa
2	21-23	32-37	52-60				
3	23-25	35-40	56-64	AD	AD	AG	AG
4	25-27	38-43	60-68	36-41	42-48	66-73	74-82
5	27-29	42-47	64-72				

### SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięt. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić w odpowiednim obuwiu oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

### SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródła ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej,

w suchym i zacienionym miejscu.

### WSKAZANIA:




- lekka niewydolność nerek
- przewlekła niewydolność nerek
- zakrzepowe zapalenie żył
- zakrzepica żył powierzchownych (przy obrzękach lub bez)
- stany po skleroterapii
- po operacji żylaków i po strippingu
- żylaki pojawiające się w okresie ciąży
- profilaktyka zatorów
- profilaktyka zakrzepicy

### PRZECIWSKAZANIA:

- ostre zapalenie tkanki podskórnej
- infekcje skórne
- obliteracja arteriopatii obwodowa
- stwierdzona alergia na składniki wyrobu

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

#### Warianty produktu

	Rozmiar 1 Krótkie Rozmiar 1 Krótkie	108,99 zł
	Rozmiar 2 Krótkie Rozmiar 2 Krótkie	108,99 zł
	Rozmiar 3 Krótkie Rozmiar 3 Krótkie	108,99 zł



Rozmiar 4 Krótkie

108,99 zł

Rozmiar 4 Krótkie



Rozmiar 5 Krótkie

108,99 zł

Rozmiar 5 Krótkie

## Galeria

