

## VEERA FORTE rajstopy uciskowe II klasa ucisku otwarte długie czarny



Cena od: 115,99 zł

### Opis produktu

**Rajstopy uciskowe VEERA Forte II klasa ucisku** to miękkie, komfortowe rajstopy kompresyjne produkowane przy użyciu zaawansowanych technologii i najwyższej jakości wykończenia. Produkt jest kryjący, ma właściwości antybakteryjne, antygrzybicze, antyalergiczne i antyzapachowe.

#### **SZCZEGÓŁY:**

KLASA KOMPRESJI: II (23-32 mmHg)

SKŁAD: 76% poliamid, 24% lycra

WERSJA: Palce otwarte

KOLOR: Czarny

DŁUGOŚĆ: Długie

WYKOŃCZENIE MANKIETU: Lamówka

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kośćczynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki jest największe i osiąga wartości 23 – 32 mmHg.

### **JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?**

Pomiarów należy dokonywać na nieobciążonej kośćczynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kośćczyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość we wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

### **SPOSÓB ZAKŁADANIA:**

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie piąty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piąty, nosić w wygodne obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

### **SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:**

Prać ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszcza się do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródła ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

### **WSKAZANIA:**

- lekka niewydolność żylna
- przewlekła niewydolność żylna
- zakrzepowe zapalenie żył
- zakrzepica żył powierzchniowych (przy obrzękach lub bez)
- stany po skleroterapii
- po operacji żyłaków i po strippingu
- żyłaki pojawiające się w okresie ciąży
- profilaktyka zatorów
- profilaktyka zakrzepicy

### **PRZECIWSKAZANIA:**

- ostre zapalenie tkanki podskórnej
- infekcje skórne
- obliteracja arteriopatii obwodowa
- stwierdzona alergia na skład wyrobu

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

### Warianty produktu



Rozmiar 1 Długie

115,99 zł

Rozmiar 1 Długie



Rozmiar 2 Długie

115,99 zł

Rozmiar 2 Długie



Rozmiar 3 Długie

115,99 zł

Rozmiar 3 Długie



Rozmiar 4 Długie

115,99 zł

Rozmiar 4 Długie



Rozmiar 5 Długie

115,99 zł

Rozmiar 5 Długie