

## VEERA podkolanówki uciskowe 140 DEN NATURALNY



Cena od: 41,99 zł

Opis produktu

**Podkolanówki uciskowe VEERA I klasa ucisku 140 DEN** to najwyższej klasy eleganckie podkolanówki. Poprawiają krążenie i perfekcyjnie modelują nogi. Podkolanówki w I klasie ucisku stosujemy profilaktycznie i przy pierwszych problemach z krążeniem. Produkt jest po to by nadać ulgę zmęczonym nogom, poprawia krążenie, zmniejsza obrzęk i uczucie ciężkich nóg. Są testowane klinicznie, uszyte w specjalnym splocie plastra miodu, by zminimalizować ryzyko "puszczenia oczka". Posiadają wzmocnione palce oraz piętę. Wyprodukowane w technologii Silver + z dodatkiem jonów srebra.

### **SZCZEGÓŁY:**

KLASA KOMPRESJI: I (18-21 mmHg)

SKŁAD: 78% poliamid, 22% elastan

WERSJA: Palce zamknięte

KOLOR: Naturalny

WYKOŃCZENIE MANKIETU: Lamówka

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kość przodkową, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki jest najwyższe i osiąga wartości 18 – 21 mmHg.

### **JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?**

Podkolanówki Veera dobieramy na rozmiar stopy.

### **SPOSÓB ZAKŁADANIA:**

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięt. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na śródstopiu zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

### **SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:**

Prać ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródła ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

### **WSKAZANIA:**

- uczucie bólu, zmęczenia i ciężkości nóg
- profilaktycznie
- ból i spuchnięte nogi (obrzęk w okolicy kostki ustępujący po przespanej nocy)

### **PRZECIWSKAZANIA:**

- uciążliwe stany uszkodzenia skóry
- ostre niedokrwienie kończyn
- krytyczne niedokrwienie kończyn
- zdekompensowana niewydolność serca
- bolesny obrzęk siniczny i bolesny obrzęk biały
- nadwrażliwość na użyte materiały
- zaburzenia czucia kończyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

## Warianty produktu



Rozmiar 1/2 35-38

41,99 zł

Rozmiar 1/2 35-38



Rozmiar 3/4 39-41

41,99 zł

Rozmiar 3/4 39-41

## Galeria

