

## VEERA podkolanówki uciskowe 70 DEN KARMEL



Cena od: 31,00 zł

Opis produktu

**Podkolanówki VEERA z uciskiem profilaktycznym 70 DEN** to najwyższej klasy eleganckie podkolanówki. Poprawiają krążenie i perfekcyjnie modelują nogi. Podkolanówki z uciskiem profilaktycznym stosujemy gdy mamy zmęczone nogi, gdy pod koniec dnia czujemy w nich ból oraz mamy obrzęk, który ustępuje po przespanej nocy. Produkt jest po to by nadać ulgę zmęczonym nogom, poprawia krążenie, zmniejsza obrzęk i uczucie ciężkich nóg. Są testowane klinicznie, uszyte w specjalnym splocie plastra miodu, by zminimalizować ryzyko "puszczania oczka". Posiadają wzmocnione palce oraz pięty. Wyprodukowane w technologii Silver + z dodatkiem jonów srebra.

## **SZCZEGÓŁY:**

KLASA KOMPRESJI: profilaktyczna (13-17 mmHg)

SKŁAD: 78% poliamid, 22% elastan

WERSJA: Palce zamknięte

KOLOR: Karmel

WYKOŹCZENIE MANKIETU: Lamówka

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kość dołną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki jest najwyższe i osiąga wartości 13 – 17 mmHg.

## **JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?**

Podkolanówki Veera dobieramy na rozmiar stopy.

## **SPOSÓB ZAKŁADANIA:**

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięt. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

## **SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:**

Prać ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródła ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

## **WSKAZANIA:**

-uczucie bólu, zmęczenia i ciężkości nóg

-profilaktycznie

-ból i spuchnięte nogi (obrzęk w okolicy kostki ustępujący po przespanej nocy)

## **PRZECIWSKAZANIA:**

-uciążliwe stłuszczenia skóry

-ostre niedokrwienie kończyn

-krytyczne niedokrwienie kończyn

-zdekompensowana niewydolność serca

-bolesny obrzęk siniczny i bolesny obrzęk biały

-nadwrażliwość na użyte materiały

-zaburzenia czucia kończyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

### Warianty produktu



Rozmiar 1/2 35-38

31,00 zł

Rozmiar 1/2 35-38



Rozmiar 3/4 39-41

31,00 zł

Rozmiar 3/4 39-41

## Galeria

