

VEERA pończochy uciskowe 70 DEN SOLEI

Cena od: 74,99 zł



Opis produktu

Pończochy VEERA z uciskiem profilaktycznym 70 DEN to najwyższej klasy eleganckie pończochy. Poprawiają kręcenie i perfekcyjnie modelują nogi. Pończochy z uciskiem profilaktycznym stosujemy gdy mamy zmęczone nogi, gdy pod koniec dnia czujemy w nich ból oraz mamy obrzęk, który ustępuje po przespanej nocy. Produkt jest po to by nadać ulgę zmęczonym nogom, poprawia kręcenie, zmniejsza obrzęk i uczucie ciężkich nóg. Są testowane klinicznie, uszyte w specjalnym splocie plastra miodu, by zminimalizować ryzyko "puszczania oczka". Posiadają wzmocnione palce oraz piętę. Wyprodukowane w technologii Silver + z dodatkiem jonów srebra.

SZCZEGÓŁY:

KLASA KOMPRESJI: profilaktyczna (13-17 mmHg)

SKŁAD: 78% poliamid, 22% elastan

WERSJA: Palce zamknięte

KOLOR: Solei

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kość dołną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki jest najwyższe i osiąga wartości 13 – 17 mmHg.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

W celu prawidłowego doboru rozmiaru należy porównać swoją wagę oraz wzrost z tabelą poniżej:

Rozmiar 1/2 WAGA 49-60 kg WZROST 150-173 cm

Rozmiar 3 WAGA 61-69 kg WZROST 161-179 cm

Rozmiar 4 WAGA 70-78 kg WZROST 158-180 cm

Rozmiar 5 WAGA 68-91 kg WZROST 168-180 cm

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięt. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródła ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

WSKAZANIA:

- uczucie bólu, zmęczenia i ciężkości nóg
- profilaktycznie
- bólce i spuchnięte nogi (obrzęk w okolicy kostki ustępujący po przespanej nocy)





PRZECIWSKAZANIA:

- uciążliwe stany uszkodzenia skóry

- ostre niedokrwienie kończyn
- krytyczne niedokrwienie kończyn
- zdekompensowana niewydolność serca
- bolesny obrzęk siniczny i bolesny obrzęk biały
- nadwrażliwość na użyte materiały
- zaburzenia czucia kończyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Warianty produktu

	Rozmiar 1/2 Rozmiar 1/2	74,99 zł
	Rozmiar 3 Rozmiar 3	74,99 zł
	Rozmiar 4 Rozmiar 4	74,99 zł
	Rozmiar 5 Rozmiar 5	74,99 zł

Galeria

