

VEERA rajstopy uciskowe 70 DEN CZARNY

Cena od: 60,00 zł



Opis produktu

Rajstopy VEERA z uciskiem profilaktycznym 70 DEN to najwyższej klasy eleganckie rajstopy. Poprawiają krążenie i perfekcyjnie modelują nogi. Rajstopy z uciskiem profilaktycznym stosujemy gdy mamy zmęczone nogi, gdy pod koniec dnia czujemy w nich ból oraz mamy obrzęk, który ustępuje po przespanej nocy. Produkt jest po to by nadać ulgę zmęczonym nogom, poprawia krążenie, zmniejsza obrzęk i uczucie ciężkich nóg. Są testowane klinicznie, uszyte w specjalnym płocie plastra miodu, by zminimalizować ryzyko "puszczenia oczka". Posiadają wzmocnione palce oraz pięty. Wyprodukowane w technologii Silver + z dodatkiem jonów srebra.

SZCZEGÓŁY:

KLASA KOMPRESJI: profilaktyczna (13-17 mmHg)

SKŁAD: 78% poliamid, 22% elastan

WERSJA: Palce zamknięte

KOLOR: Czarny

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kośćczynek dolny, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki jest najwyższe i osiąga wartości 13 – 17 mmHg.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

W celu prawidłowego doboru rozmiaru należy porównać swoją wagę oraz wzrost z tabelą poniżej:

Rozmiar 1 WAGA 44-52 kg WZROST 150-158 cm

Rozmiar 2 WAGA 52-62 kg WZROST 158-164 cm

Rozmiar 3 WAGA 62-70 kg WZROST 164-170 cm

Rozmiar 4 WAGA 70-82 kg WZROST 164-176 cm

Rozmiar 5 WAGA 80-90 kg WZROST 170-182 cm

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięt. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z zakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie lub w pralce w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródła ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

WSKAZANIA:

-uczucie bólu, zmęczenia i ciężkości nóg

-profilaktycznie






-bólce i spuchnięte nogi (obrzęk w okolicy kostki ustępujący po przespanej nocy)

PRZECIWSKAZANIA:

- uci??liwe s?cz?ce si? uszkodzenia skóry
- ostre niedokrwienie ko?czyn
- krytyczne niedokrwienie ko?czyn
- zdekompensowana niewydolno?? serca
- bolesny obrz?k siniczny i bolesny obrz?k bia?y
- nadwra?liwo?? na u?yte materia?y
- zaburzenia czucia ko?czyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. U?YWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJ? U?YWANIA LUB ETYKIET?.

Warianty produktu

| | | |
|--|------------------------|----------|
|  | Rozmiar 1 Rozmiar 1 | 60,00 zł |
|  | Rozmiar 2 Rozmiar 2 | 60,00 zł |
|  | Rozmiar 3 Rozmiar 3 | 60,00 zł |
|  | Rozmiar 4 Rozmiar 4 | 60,00 zł |
|  | Rozmiar 5 Rozmiar 5 | 60,00 zł |

Galeria

| | |
|---|--|
| <p>UCISK oznaczona pięta gwarantuje przeciwdziałanie rozmarszczeniu skóry</p> | <p>JAKOŚĆ szpilki pletera miodu - wyrob zachowane stabilizacja uciskowa przez min. 6 miesięcy</p> |
| <p>LEKKOŚĆ dzięki lekkim lekkim przez cały dzień, zapewniają komfort, redukują bóle i obrzęki nóg</p> | <p>TRWAŁOŚĆ dzięki specjalnemu sprężeniu wyrobki odporne na nie- „zwykłe szaranie”</p> |
| <p>MODELOWANIE zaobrotła modelująca sprężyna, dzięki czemu lepiej wygląda całe ciało i nogi</p> | <p>NAGRODY prestiżowa nagroda Konsumentki Later jakości 2015</p> |
| <p>ŚWIEŻOŚĆ wodoszczelne powłoki dla higieny, ochrony i świeżości</p> | <p>BADANIA wyrobki testowane przez specjalistów kliniczne, precyzyjne strefy ucisku, anatomiczne otwory z zabezpieczeniem pięty</p> |
| <p>40 DEN WCIŚNIENIE: 10-12 MMHG WCIŚNIENIE: 8-12 MMHG</p> | <p>70 DEN WCIŚNIENIE: 10-12 MMHG WCIŚNIENIE: 13-17 MMHG</p> |
| <p>140 DEN WCIŚNIENIE: 10-12 MMHG WCIŚNIENIE: 17-21 MMHG</p> | |

* PROFILAKTYKA
 ** PREVENIJA OBRZĘKÓW
 *** OCHRONA NOGI
 **** OCHRONA PRZED
 ***** OCHRONA PRZED
 ***** OCHRONA PRZED

